



# Come utilizzare la Puregon Pen®

Vi sono due passaggi importanti da apprendere:

1. Caricare la penna con una fiala.
2. Iniettare il Puregon

## Come preparare l'iniezione



1. Svitare la penna dal portafiala



2. Inserire la fiala e avvitare di nuovo il corpo della penna



3. Avvitare l'ago fino in fondo e rimuovere il cappuccio di protezione.



4. Dalla punta dell'ago dovrebbe fuoriuscire una piccola quantità di liquido. Qualora non si veda alcuna goccia, ruotare di uno scatto la manopola di dosaggio e premere il pulsante di iniezione.



5. Ruotare la manopola di dosaggio in senso antiorario fino al punto di dosaggio stabilito.



6. Se inavvertitamente si ruota la manopola di dosaggio oltre in punto indicante la dose raccomandata impostando erroneamente una dose troppo alta, (UI), non cercare di correggere l'errore ruotando all'indietro ma continuare a ruotare la manopola in avanti fin dove arriva. A quel punto la scala di dosaggio dovrebbe muoversi nuovamente liberamente.



7. A questo punto, premere completamente il pulsante di iniezione e ruotare la manopola di dosaggio impostando la dose corretta partendo da zero. In tal modo si eviteranno sprechi del farmaco.

## Come somministrare l'iniezione:

Puregon si inietta sottocute nell'addome appena sotto l'ombelico.



1. Si consiglia di non iniettare il farmaco sempre nello stesso punto ma di cambiare ogni volta il sito di iniezione.



2. Una volta individuato il sito di iniezione, formare una piccola plica cutanea con le dita sollevando e tendendo la pelle fra il pollice e l'indice e con l'altra mano introdurre l'ago nella cute perpendicolarmente. Premere completamente il pulsante di iniezione ed attendere cinque secondi.



3. Svitare l'ago utilizzando il suo cappuccio di protezione. Gettare l'ago secondo le istruzioni ricevute dalla clinica. Se è stata iniettata una dose intera, sulla finestra di dosaggio dovrebbe apparire il numero 'zero'.

## Sostituzione della fiala:

Se prima o durante l'iniezione ci si accorge che la fiala contiene una quantità insufficiente di liquido, esistono due possibilità:

1. eliminare la fiala e sostituirla con una nuova e somministrare la dose stabilita;
2. esaurire la fiala ancora presente nella penna e somministrare il resto della dose da una nuova fiala.

Si raccomanda di consultare il dottore o un infermiere se si hanno dubbi circa la procedura di somministrazione dell'iniezione! La fiala contiene sempre un po' di farmaco in più rispetto a quanto indicato sulla confezione. Non è importante se non si riesce a vedere quanto farmaco c'è nella fiala prima di finire l'iniezione. La finestra di dosaggio indicherà la quantità di farmaco mancante.

## Istruzioni di sicurezza

- La Puregon Pen può essere utilizzata solo per il trattamento di una singola persona.
- La Puregon Pen può essere utilizzata solo con le fiale di Puregon.
- Conservare la penna con le fiale in frigorifero (+2 – +8°C) o a temperatura ambiente (ad una temperatura massima di +25° C) fino ad un massimo di 3 mesi.