



# طرز مصرف Puregon Pen®


شما باید دو عمل اصلی زیر را فرا بگیرید:

۱. پرکردن مداد تزریقی با محتوای یک آمپول
۲. تزریق کردن Puregon


## روش آماده سازی فرآورده برای تزریق:




۱. قلم را بپیچانید تا باز شود.

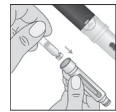


۲. آمپول را وارد قلم نموده و قلم را بپیچانید تا بسته شود.

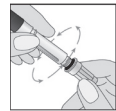


۳. سوزن را بپیچانید تا خوب در جایش سفت شود، سپس روکش سوزن را بردارید.

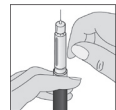


۴. اگر قطره ای در نوک سوزن ندیدید، پیچ تنظیم دوز را باندازه ی یک تفه، برخلاف عقربه ی ساعت بچرخانید و دگمه ی تزریق را فشار دهید.

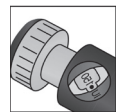

۵. قلم را با چرخاندن پیچ تنظیم دوز برخلاف عقربه ی ساعت، برای دوز تجویزی خود میزان نمایید.

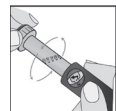


۶. اگر ندانسته پیچ تنظیم دوز را بیش از مقدار مصرف تجویزی (برحسب واحد بین المللی) چرخانید، آنرا را وارونه نچرخانید. در عوض، به چرخاندن پیچ برخلاف عقربه ی ساعت، تا اندازه ای که جا دارد، ادامه دهید.

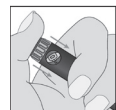


۷. سپس، دگمه ی تزریق را تا ته فشار داده و پیچ تنظیم دوز را بچرخانید تا بر روی دوز صحیح قرارگیرد. بدین طریق، از هدر رفتن دارو جلوگیری میشود.

## چگونگی تزریق فرآورده:


Puregon به شکم و در زیر پوست پایین ناف تزریق میگردد.

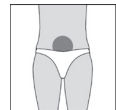

۱. دارو را هر بار در یک جا تزریق ننمایید، بلکه سعی کنید تا اندازه ای محل های تزریق را دور از هم انتخاب کنید.

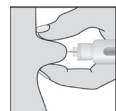

۲. با فشردن پوست در میان انگشتان نشانه و شست، محل تزریق را برآمده سازید. با دست دیگر، سوزن را با زاویه ی قائمه کاملاً در پوست فرونمایید. دگمه ی تزریق را تا انتها فشار داده و پنج ثانیه صبر کنید.

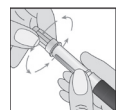

۳. سپس را سوزن را بکمک روکش آن بپیچانید تا باز شود. سپس سوزن را طبق روشی که در درمانگاه آموخته اید، دور بریزید. چنانچه همه محتوای آمپول را تزریق کرده باشید، عدد “صفر (zero)” بر روی نمایشگر دوزبندی (دوز تجویزی) بر روی قلم، مشاهده میشود.

## تعویض آمپول:

چنانچه، پیش از انجام تزریق یا در حین عمل، متوجه شوید که داروی کافی در آمپول موجود نیست، دو کار میتوان کرد:

۱. میتوانید آمپول را دور انداخته، با یک آمپول پر جایگزین و دارو را تزریق نمایید.
۲. میتوانید همه ی محتویات آمپول را تزریق نموده و برای باقیمانده ی دوز مورد نیاز، از یک آمپول پر استفاده کنید.

اگر در باره ی چگونگی تزریق فرآورده مشکوک هستید، با پزشک یا پرستار تان تماس بگیرید! توجه داشته باشید که همواره مقدار کمی بیش از آنچه بر روی بسته بندی فرآورده قید شده، دارو در آمپول موجود میباشد. اگر پیش از پایان تزریق، متوجه نشدید که مقدار دارویی کمتر از دوز مورد نیاز در آمپول موجود است، جای نگرانی نیست. نمایشگر دوزبندی بر روی قلم، نشان میدهد که هنوز چه مقدار دارو بایستی تزریق گردد.

## توصیه های ایمنی

- Puregon Pen را میتوان تنها برای درمان یک بیمار خاص، بکاربرد.
- Puregon Pen را میتوان تنها با آمپول های Puregon بکاربرد.
- قلم تزریق را به همراه آمپولها در یخچال (بین ۲+ تا ۸+ درجه ی سانتیگراد) یا در دمای اتاق (حداکثر ۲۵+ درجه ی سانتیگراد) برای مدت حداکثر سه ماه، نگهداری نمایید.